



GEKO

UNIVERSAL DUAL CEMENT 7 4

GEKO UNIVERSAL RESIN CEMENT Duale - Rilascio di Fluoro - Idrofilo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GEKO è il primo cemento resinoso con legame umido. Il materiale si lega in ambiente leggermente umido.

È autoadesivo, forma legami chimici con la dentina e lo smalto, con metalli preziosi e non, ceramiche, compositi e perni in fibra.

Non sono richiesti agenti leganti, anche se è possibile il loro uso.

La mordenzatura dello smalto è consigliata, ma non è necessario mordenzare la dentina. GEKO è indicato per cementare PFM, oro, tutti i tipi di corone ceramiche, Cerec, inlay, onlay, perni in oro, in titanio e in fibra, Maryland Bridges e faccette, inoltre per i materiali usati per lo splintaggio come acciaio e nylon. La viscosità del cemento è ideale per la cementazione. Il suo riempitivo contiene particelle con diametri anche inferiori al micron. Lo spessore del film è di 14 micron. È consigliabile l'uso di un inibitore d'ossigeno. Dopo la fotopolimerizzazione il cemento è impermeabile all'acqua e crea un sigillo marginale impenetrabile.

COME USARE LA SIRINGA AUTOMIX

- 1 Rimuovere il cappuccio e posizionare un puntale sulla siringa Automix.
- 2 Per assicurare una regolare miscela di base e catalizzatore, estrarre una goccia (2-3 mm) di cemento sui foglietto da impasto e scartarlo.
- 3 Dispensare il cemento miscelato direttamente nel dente o nel restauro.
- 4 Gettare il puntale, richiudere la siringa. Non contaminare la base con il catalizzatore.

GEKO ISTRUZIONI PER L'USO

Inumidire leggermente le superfici se queste sono secche. Rimuovere l'eccesso di acqua con un pellet di cotone o con aria compressa. Le superfici dovrebbero essere lucide o brillanti. Le superfici troppe bagnate risulteranno meno adese.

CEMENTAZIONE DI PERNI

- 1 Preparare l'alloggiamento del perno.
- 2 Sciacquare e rimuovere l'eccesso di acqua con un leggero getto d'aria o un cono di carta. LASCIARE LA DENTINA LEGGERMENTE UMIDA
- 3 Mordenzatura e sistemi adesivi non sono richiesti.
- 4 Inserire un puntale sulla siringa Automix ed estrarre il materiale. Se si usano le siringhe standard, dispensare una uguale quantità di pasta base e catalizzatore e miscelare con una spatola per 20 secondi. Richiudere con attenzione le siringhe. Non contaminare la base e il catalizzatore.
- 5 Inserire il cemento nel canale senza formare bolle.
- 6 Posizionare il perno.
- 7 Rimuovere l'eccesso di cemento.
- 8 Fotopolimerizzare per 40 secondi. Il cemento continuerà l'auto indurimento per 7-8 minuti. Il trattamento può essere completato una volta terminata la polimerizzazione.

CEMENTAZIONE DI CORONE

- 1 Mordenzare o sabbare la superficie interna della corona.
- 2 Sciacquare il dente preparato e rimuovere l'eccesso di acqua.
LASCIARE LA SUPERFICIE DEL DENTE LEGGERMENTE UMIDA.
- 3 Mordenzature e agenti adesivi non sono necessari.
- 4 Posizionare il lubrificante sui denti adiacenti.
- 5 Inserire un puntale sulla siringa Automix ed estrarre il materiale. Se si usano le siringhe standard, dispensare una uguale quantità di pasta base e catalizzatore e miscelare con una spatola per 20 secondi. Richiudere con attenzione le siringhe. Non contaminare la base con il catalizzatore.
- 6 Inserire il cemento sotto la corona e posizionare la corona.
- 7 Rimuovere l'eccesso di cemento con un filo interdentale, mentre si mantiene una pressione sulla corona. Il cemento può aderire ai denti adiacenti se l'eccesso non viene rimosso.
- 8 Applicare un inibitore d'ossigeno sui margini per eliminare lo strato di inibizione.
- 9 Fotopolimerizzare i margini. GEKO continuerà l'autopolimerizzazione per 7-8 minuti per completare l'indurimento.

CEMENTAZIONE DI INLAY E ONLAY

- 1 Sciacquare la preparazione del dente e rimuovere l'eccesso di acqua.
LASCIARE LA SUPERFICIE DEL DENTE LEGGERMENTE UMIDA:
- 2 Inserire un puntale sulla siringa Automix ed estrarre il materiale. Se si usano le siringhe standard dispensare una uguale quantità di pasta base e catalizzatore e miscelare con una spatola per 20 secondi. Richiudere con attenzione le siringhe. Non contaminare la base con il catalizzatore.
- 3 Inserire il cemento nella preparazione e posizionare il restauro.
- 4 Rimuovere l'eccesso di cemento con un filo interdentale, mentre si mantiene una pressione sull'inlay o onlay. Il cemento può aderire ai denti adiacenti se l'eccesso non viene rimosso.
- 5 Applicare inibitore d'ossigeno sui margini per eliminare lo strato di inibizione.
- 6 Fotopolimerizzare per 20-30 secondi. Il cemento completerà l'autopolimerizzazione in 7-8 minuti.

AVVERTENZE

- Materiale non polimerizzato, può causare irritazione agli occhi, alla pelle se tenuto in contatto. Il professionista dovrebbe indossare occhiali e guanti.
- Mantenere il materiale a temperatura ambiente. Evitare la luce diretta, eccessive temperature alte o basse, contaminazione.
- Validità 2 anni dalla data di fabbricazione.
- Richiudere immediatamente le siringhe dopo l'uso.

DISTRIBUITO DA DITTA FACCHINI

Tel +39 02 87390020 - info@dittafacchini.org

www.dittafacchini.org

Fabbricante: Bioloren s.r.l

Via Volta, 59 - 21047 Saronno (VA) - Italia

CE 0546

Rev. 1 - 04/2011

